
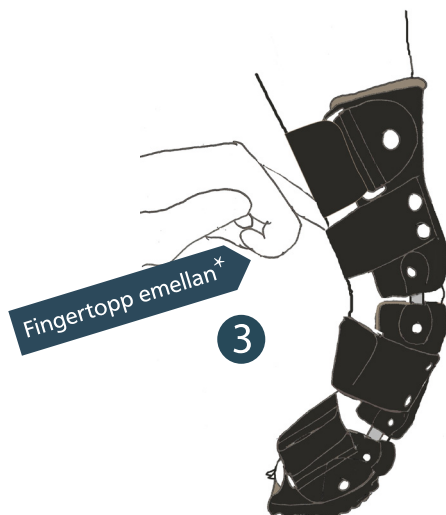
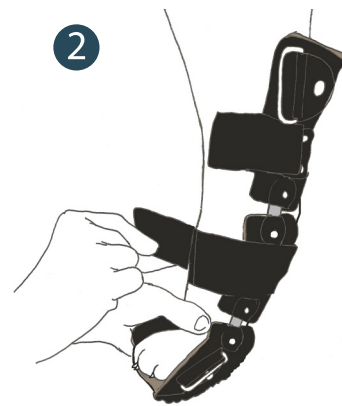


Utprovningssmall Ledad Carpal och Ledad Metacarpal för användning dygnet runt

Denna ortos har två lager polstring, ett fast och ett löst. Då djuret skall ha ortosen dygnet runt, använd den medföljande neoprenstrumpan och ta ut det lösa lagret polstring. Det lösa lagret används enbart då man inte använder ortosen dygnet runt och då passar ortosen utan den medföljande neoprenstrumpan.

1. Håll tassens vinklad uppåt och för den inåt i ortosen tills det tar stopp. Placera tassens och benet i ortosen, klorna skall precis vara vid kanten eller hänga utanför plastkanten på ortosen. Tårna skall fortfarande vara inne i ortosen. Vi vill inte att plastkanten skall belastas tårnans leder.
2. Håll kvar tumgreppet på tassens och börja med att spänna bandet/banden i mitten, följt av nedre och slutligen övre. Banden skall spännas åt så att de varsamt håller fast ortosen emot benet men inte för hårt så att det stoppar cirkulationen. Du skall precis kunna få in en fingertopp under bandet.

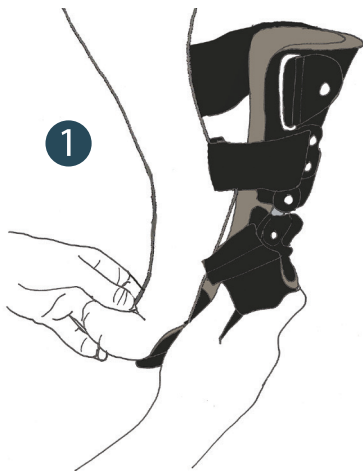

3. Klipp till kuddarna så att de hamnar innanför kanten när bandet är åtdraget. När banden sitter bra, greppa ortosen med en hand och greppa benet proximalt. Känn efter om det uppstår rörlighet och benet rör sig i ortosen. Mjukdelarna kommer att röra sig, men benet skall sitta på plats i ortosen.

*Gäller alla banden.

4. För att undersöka hur ortosen påverkar gångcykeln; ortosen skall tillåta rörelse utan extern eller intern rotation av ortosen eller benet.
5. Kolla så att inte benet abduceras / adduceras vid gång.

Undersök noggrant efter svullnad eller om skavsår uppstår de första dagarna för att ha en säker utprovning av ortosen. I början av ortosbehandlingen skall ortosen tas av och kollas så att inte skav och andra problem uppstår. Detta ska göras ofta i början, men kan avta efter 3-5 dagars användning. Om möjligt ska ortosen användas 2-3 timmars perioder i början och vid behov öka tiden eftersom. Detta försäkras att introduktionen blir positiv och lyckad. Var alltid närvarande när hunden testar ortosen i nya aktiviteter som t.ex. att gå i trappor.

Kontakta oss vid vätskande sår, om det börjar lukta eller om annat problem uppstår. Det är alltid lättare att behandla komplikationer man märker tidigt, så säg till vid hudirritationer om möjligt innan det blivit ett sår eller vätskar.

Ortosen påverkar alltid gången. Verkar det obekvämt för patienten? Om djuret slickar, biter eller ej använder benet så kontakta oss. Var även uppmärksam på ändrat beteende exempelvis om humöret inte är som det brukar eller om djuret inte vill äta. Kontakta oss ifall du har frågor!

Vi rekommenderar ett återbesök till kliniken 7-10 dagar efter utprovningen av ortosen. Detta för att utvärdera hur behandlingen går och göra en ny gånganalys av gångcykeln när hunden är mer komfortabel och van med sin ortos. Ortosen ska främst användas när hunden går eller är aktiv om inte veterinären ordinerat annat. Om hunden har ortosen på sig när den ligger kan skav lätt uppstå. Om problem uppstår, kontakta oss på Scandi Orthopedic.

Rengör ortosen med tvål och vatten. Håll kardborren ren för bästa fästförmåga.

OBS! Informera hundägarna om Scandi Orthopedic AB. De skall kontakta oss för frågor gällande ortosens användning och för problemlösning.

Tel. 031-21 41 28

